


Contour[®] plus

System til måling af blodsukker

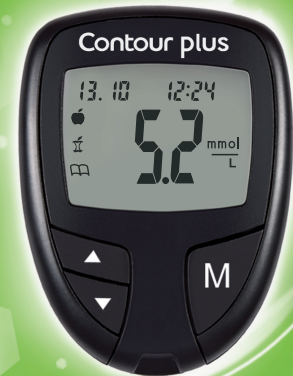

KORT VEJLEDNING


Dit CONTOUR[®]PLUS apparat:



Anvend kun CONTOUR[®]PLUS teststrimler

Grå ende: Indsæt denne ende i teststrimmelporten.

Prøvetagningsspids: Blodprøven suges ind her.

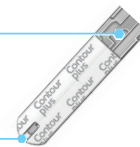

Se brugervejledningen til dit CONTOUR PLUS og fingerprikkers indlægsseddel for komplet vejledning.




ADVARSEL
Vask altid hænderne godt med sæbe og vand, og tør dem grundigt, før og efter du foretager målinger og håndterer apparatet, fingerprikkeren eller teststrimlerne.

FORSIGTIG: Fingerprikkeren er beregnet til brug ved egenmåling på en enkelt patient. På grund af risikoen for infektion må den ikke bruges til flere end én person.


Sådan måler du - fingerspids

1. Tag endehætten af fingerprikkeren.


2. Løsn den runde beskyttelseshætte på en lancet ved at dreje den en ¼ omgang, men tag den ikke af.

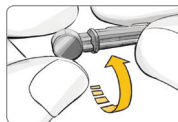


3. Sæt lancetten fast i fingerprikkeren, indtil den ikke kan komme længere.

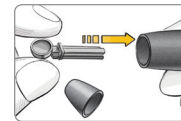


4. Skru den runde beskyttelseshætte af lancetten.

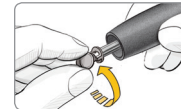


5. Sæt endehætten på igen.

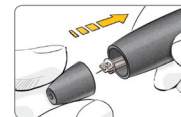

6. Juster endehættens drejeknap til den foretrukne indstiksdybde.

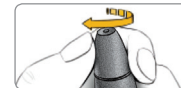

7. Før den grå ende af teststrimlen ind i teststrimmelporten på apparatet.

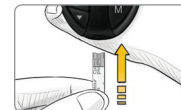

Apparatet tænder og viser en teststrimmel og en blinkende bloddråbe på skærmen. Apparatet er nu klar til måling.

8. Tryk fingerprikkeren fast mod indstiksstedet, og tryk på udløserknappen.




Stryg hånden og fingeren i retning mod indstiksstedet, så der dannes en bloddråbe.


9. Lad straks spidsen af teststrimlen berøre bloddråben. **Hold strimlen i bloddråben, indtil apparatet bipper.**

Hvis den første bloddråbe ikke er stor nok, bipper apparatet 2 gange. Du har ca. 30 sekunder til at tilføre mere blod til den samme teststrimmel. Resultatet vises efter 5 sekunders nedtælling.

10. Tag teststrimlen ud for at slukke apparatet.

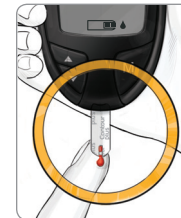

Måling fra fingerspidsen

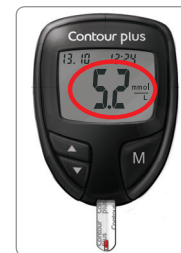

Bortskaf teststrimlen som risikoaffald, eller følg din diabetesbehandlers anvisninger.

FORSIGTIG:

- Fingerprikkeren er ikke beregnet til at blive anvendt af sundhedsfagligt personale. På grund af risiko for infektion må den ikke bruges til flere end én person.
- Se detaljerede oplysninger om, hvordan du fjerner lancetten fra fingerprikkeren i indlægssedlen til fingerprikkeren.
- Illustrationen af fingerprikkeren er kun vejledende.

Har du brug for hjælp?
Kundesupport: +45 42 82 80 00
www.diabetes.ascensia.com

⚠ ADVARSEL: Potentiel biologisk risiko
Alle systemer til måling af blodsukker anses for at udgøre en biologisk risiko. Sundhedspersonale eller andre personer, der anvender dette system til flere patienter, skal følge den pågældende institutions procedure for infektionskontrol. Alle produkter eller objekter, der kommer i kontakt med menneskeblod, skal, også efter rengøring, håndteres, som om de kan overføre smitsomme sygdomme. Brugeren bør følge anbefalingerne til forebyggelse af overførsel af blodbårne sygdomme i sundhedssektoren, således som det anbefales ved potentielt smitsomme humane prøver.

Læs mere om patenter og relaterede licenser på:
www.patents.ascensia.com

© 2019 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheder forbeholdes. Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoet, Clinilog, Contour, Glucofacts og No Coding (Ingen kodning) logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Anvendelse af Avanceret brugerniveau

Sådan indstilles apparatet til Avanceret brugerniveau






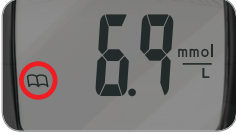
For at indstille apparatet til Avanceret brugerniveau og få fordel af måltidsmarkører og andre funktioner, skal du:

1. Trykke på **M** for at tænde apparatet.
2. Holde **▲** eller **▼** nede i 3 sekunder.
3. L-1 begynder at blinke.
4. Trykke på **▲** eller **▼** for at skifte til L-2.
5. Trykke på **M** for at gemme indstillingen.



Se, hvordan disse ekstra funktioner kan hjælpe dig med at håndtere din diabetes.
Kontakt Kundeservice på +45 42 82 80 00
www.diabetes.ascensia.com




Efter du har foretaget en måling og ser dine resultater, kan du bruge markørerne på skærmen:

For at markere resultater >	Visning >	For at indstille >	Visning >	Betydning >
Før måltid Markerer et resultat, som blev målt før et måltid. Tryk på ▲ eller ▼	 (Blinker)	Tryk på M		Resultatet er markeret som en måling før et måltid. Tryk på M igen for at indstille en påmindelse om at foretage en måling efter et måltid.
Efter måltid Markerer et resultat, som blev målt efter et måltid. Tryk på ▲ eller ▼	 (Blinker)	Tryk på M		Resultatet er markeret som en måling efter et måltid.
Dagbog Markerer et resultat som unikt eller på anden måde anderledes. Tryk på ▲ eller ▼	 (Blinker)	Tryk på M		Resultatet er markeret i hukommelsen som unikt. Du bør notere dette i din dagbog.

 Indstiller en påmindelse (forindstillet til 2 timer) til at foretage en måling efter et måltid. Se brugervejledningen for komplet vejledning i, hvordan markørerne bruges, og påmindelsestidspunkterne justeres.

Fejlkoder og symboler

Se din brugervejledning for en komplet liste.

E1 	Temperatur uden for området.
E2 	Der var et problem med at fylde teststrimlen helt. Mål igen med en ny teststrimmel.
E3 	Apparatet registrerer en brugt teststrimmel, eller at der er blevet anvendt en forkert kontrolopløsning. Mål igen med en ny teststrimmel.
E11	Unormalt resultat. Mål igen med en ny teststrimmel.

Distributør i Danmark:
Ascensia Diabetes Care Denmark ApS
Arne Jacobsens Allé 7, 5. Sal
DK-2300 København S
Kundesupport: +45 42 82 80 00
diabetesdk@ascensia.com

 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland



 **ASCENSIA**
Diabetes Care

90005255
Rev. 11/19