

Contour next link²⁴

Système d'autosurveillance
glycémique par radio
fréquence RF

Utilisation uniquement avec les
bandelettes réactives CONTOUR®NEXT




ASCENSIA
Diabetes Care

Medtronic

MANUEL D'UTILISATION SIMPLIFIÉ

Lecteur de glycémie

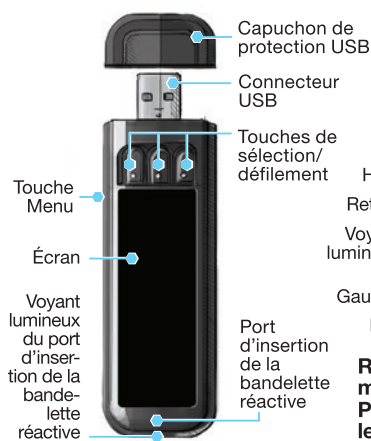

Pompe



REMARQUE : Vérifier les unités de mesure du lecteur de glycémie. Pour plus d'informations, consulter le Manuel d'utilisation.

85701606 Rev. 03/17

Configuration initiale du lecteur et connexion à la pompe à insuline MiniMed® 640G

Chargement du lecteur de glycémie

- 1 Enlever le capuchon de protection USB pour faire apparaître le connecteur USB.



Le lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT LINK 2.4 est équipé d'une batterie rechargeable.


Charger le lecteur de glycémie avec le chargeur mural* ou en branchant le connecteur USB à un ordinateur. S'assurer que l'ordinateur est allumé.

Le lecteur de glycémie affiche brièvement à l'écran « Ne pas se tester – En charge » et le port d'insertion de la bandelette réactive clignote. **Ne pas réaliser de test de glycémie pendant que le lecteur de glycémie est en charge.**

Lorsque la batterie est rechargée, le voyant lumineux du port d'insertion de la bandelette réactive s'éteint. Déconnecter le lecteur de glycémie CONTOUR NEXT LINK 2.4 pour réaliser un test de glycémie.

Déconnecter le lecteur de glycémie de la source de charge avant de commencer la configuration

- 2 Pour commencer la configuration, maintenir enfoncée la touche Menu pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que le lecteur de glycémie s'allume.

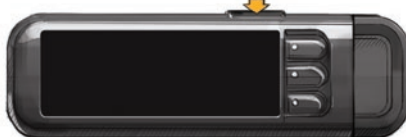

- 3 Faire défiler vers le bas pour sélectionner la langue souhaitée. Appuyer sur **OK**.




Cet écran montre les langues disponibles. L'ordre des langues peut varier en fonction de votre pays.


- 4 Appuyer sur **OK** si la langue en surbrillance est celle souhaitée. Appuyer sur **NON** si la langue affichée n'est pas la langue souhaitée.

Connecter à la pompe

- 5 Connecter une pompe MiniMed ? Appuyer sur **OK**.

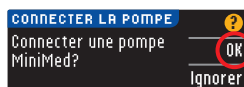


- 6 Appuyer sur **OK**.

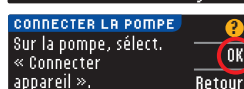

- 7 Reposer le lecteur et saisir la pompe.

Appuyer sur une touche pour allumer l'écran, puis sur la touche Menu. Utiliser la flèche de défilement vers le bas pour aller jusqu'à **Fonctions**. Appuyer sur la touche de sélection.

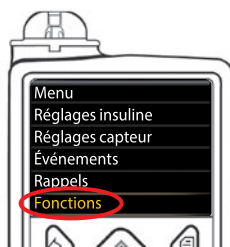


Si rien n'apparaît sur l'écran de la pompe, appuyer sur une touche pour le réactiver.


- 8 Dans le menu Fonctions, utiliser la flèche de défilement du bas pour accéder à **Choix des appareils**. Appuyer sur la touche de sélection.




- 9 Dans le menu Choix des appareils, faire défiler l'écran jusqu'à **Connecter l'appareil**. Appuyer sur la touche de sélection.

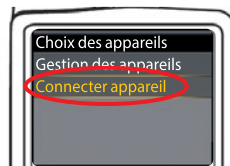

- 10 Poser le lecteur et la pompe côte à côte. Sélectionner **Connexion automatique** sur la pompe.

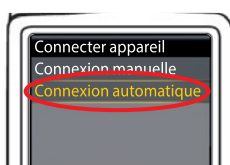


Sélectionner **Connexion automatique** sur le lecteur.

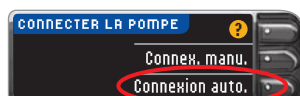



- 11 Lire l'écran de la pompe à l'aide de la touche de défilement pour atteindre la page suivante.

Utiliser la touche de défilement pour atteindre **Continuer**. Appuyer sur la touche de sélection.

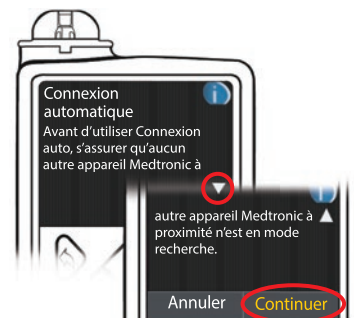

- 12 Poser le lecteur et la pompe côte à côte. Sélectionner **Rechercher** sur la pompe.



Sélectionner **Rechercher** sur le lecteur de glycémie.

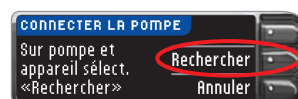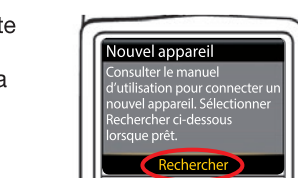

La recherche peut prendre jusqu'à 2 minutes.



- 13 Vérifier que le NS de l'appareil (numéro de série) sur la **pompe** correspond au NS de l'appareil sur le **lecteur** de glycémie. S'ils sont identiques, faire défiler l'écran de la pompe jusqu'à **Confirmer**. Appuyer sur la touche de sélection.

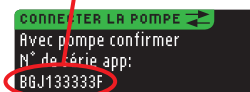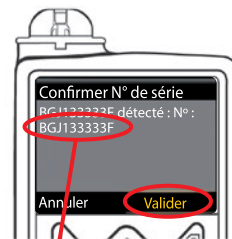


Lorsque la pompe se connecte au lecteur, le NS affiché sur l'écran du **lecteur** est remplacé par un numéro de série différent. Ce numéro est le NS de la **pompe**.

- 14 Retourner la pompe. S'assurer que le NS au dos de la **pompe** correspond au NS de la pompe qui s'affiche sur l'écran du **lecteur de glycémie**. Appuyer sur **Suivant**.



- 15 Sélectionner **Toujours** et appuyer sur **OK** sur l'écran suivant.

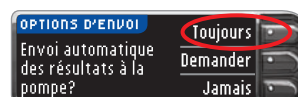


- 16 Sélectionner **Format de la date**.




- 17 Appuyer sur **OK**.

Remarque : Si l'heure et la date sont incorrectes, les modifier sur la pompe.

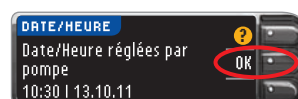

- 18 Appuyer sur **Accepter** pour sélectionner **AutoLog désactivé**.

AutoLog permet de marquer le résultat d'un test comme **À jeun**, **Avant repas** ou **Après repas**. Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation.

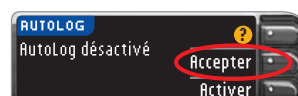

*Le chargeur mural n'est pas inclus dans tous les conditionnements du système d'autosurveillance glycémique. Contacter le Service Clientèle pour savoir comment vous procurer un chargeur mural.

Tourner la page pour finaliser la configuration. ➡

19

Accepter ou Modifier les valeurs d'Alerte haute et basse.
Le lecteur de glycémie vous Alerte d'un signal sonore lorsque la valeur de la glycémie est supérieure ou inférieure à vos valeurs préconfigurées.

ALERTE HAUTE-BASSE

Haute: 250 mg/dL

Basse: 70 mg/dL

Accepter

Modifier

20

Accepter ou Modifier l'intervalle Cible.
L'intervalle Cible est l'objectif pour les résultats glycémiques.

CIBLE

70 - 180

Accepter

Modifier

REMARQUE : Les Alertes ne peuvent être configurées qu'en dehors de votre ou de vos intervalles Cibles. Les Cibles peuvent être configurées dans l'intervalle défini par les valeurs des Alertes. Pour plus d'informations, contacter le Service Clientèle. Voir les coordonnées du Service Clientèle ci-dessous.

21

La configuration du système est maintenant terminée et le lecteur est prêt pour la réalisation d'un test de glycémie.
Passer à l'Étape 1 ci-dessous.

Configuration terminée.
Insérer une bandelette pour faire une analyse.

Matériel nécessaire pour la réalisation du test de glycémie

Bandelette réactive
CONTOUR®NEXT

Autopiqueur

Lancette

Lecteur de glycémie
CONTOUR®NEXT LINK 2.4

⚠

AVERTISSEMENT :

- L'autopiqueur est conçu pour l'autosurveillance d'un seul patient. Il ne doit pas être utilisé sur plus d'une personne en raison du risque d'infection.^{1,2}
- Utiliser une nouvelle lancette pour chaque test, car les lancettes ne sont plus stériles après utilisation.
- Toutes les pièces de ce conditionnement sont considérées comme biologiquement dangereuses et peuvent potentiellement transmettre des maladies infectieuses, même après nettoyage.
- Bien se laver les mains à l'eau savonneuse avant et après un test de glycémie, la manipulation du lecteur de glycémie, de l'autopiqueur ou des bandelettes réactives.

Pour plus d'informations sur l'entretien du lecteur de glycémie, consulter le manuel d'utilisation.

Réalisation d'un test de glycémie

Prélèvement sanguin

1

Insérer la bandelette réactive et attendre l'apparition du message **APPLIQUER LE SANG**.

2

Retirer l'embase réglable de l'autopiqueur. Insérer fermement la lancette dans l'autopiqueur jusqu'à ce qu'elle soit complètement bloquée.

3

Replacer l'embase. Tourner la molette de l'embase pour ajuster la profondeur de la piqûre.

4

Prélèvement sanguin.

5

Mettre immédiatement l'extrémité de la bandelette réactive en contact avec la goutte de sang. Si la première goutte de sang n'est pas suffisante, le lecteur de glycémie émet deux signaux sonores et affiche à l'écran **QUANTITÉ SANG INSUFFISANTE**. Vous avez environ 30 secondes pour appliquer davantage de sang sur la même bandelette réactive.

Réalisation du test de glycémie

REMARQUE : Si la fonction AutoLog est activée, avant que le résultat glycémique ne s'affiche, un message vous invite à identifier le résultat glycémique comme ayant été réalisé À jeun, Avant repas ou Après repas. Si le résultat glycémique est supérieur au paramètre Alerte haute ou inférieur au paramètre Alerte basse, le résultat glycémique affiché n'exige pas d'être marqué avec la fonction AutoLog.

Références

- 1

US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- 2

Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder: use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and Human Services; 8/23/2010. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Envoi des résultats à la pompe MiniMed

6

Si **Toujours** a été sélectionné dans **Options d'envoi** au moment de la **Configuration**, les résultats seront envoyés directement à la pompe. Si l'option **Demander** a été sélectionnée dans **Options d'envoi** pendant la **Configuration**, vous pouvez choisir de transmettre vos résultats à la pompe après chaque test de glycémie.

Appuyer sur

Envoi: Oui

OU

Envoi: Non.

MISE EN GARDE : Vérifier systématiquement que le résultat glycémique affiché sur la pompe correspond à celui affiché sur le lecteur de glycémie.

Bolus, Rappel et Remarques

7

Sélectionner **Bolus** pour envoyer un bolus à la pompe. Sélectionner **Rappel** pour programmer un rappel pour le prochain test de glycémie. Sélectionner **Notes** pour ajouter des informations au résultat.

Confirmer l'envoi du résultat glycémique à la pompe

8

Prendre la pompe. Maintenir enfoncée la touche Retour pour revenir à la page d'accueil. Le résultat glycémique doit s'afficher sur l'écran de la pompe.

Éteindre le lecteur de glycémie

9

Retirer la bandelette réactive et le lecteur de glycémie s'éteint après 3 minutes. Maintenir enfoncée la touche Menu pour éteindre le lecteur de glycémie.

Pour des instructions complètes, consulter le manuel d'utilisation CONTOUR NEXT LINK 2.4, la notice d'utilisation de l'autopiqueur et le manuel d'utilisation de la pompe à insuline MiniMed.

Le Service Clientèle d'Ascensia Diabetes Care est disponible en France au : 0800 34 22 38 (appel gratuit depuis un poste fixe) E-Mail : autosurveillance.diabete@ascensia.com www.ascensiadibetescare.fr, en Belgique au 0800 97 212, au Luxembourg au 800 27 254. E-Mail Belgique et Luxembourg: info@ascensiadibetescare.be www.ascensiadibetescare.be www.diabetes.ascensia.com

Pour obtenir des informations sur les brevets et les licences associées, consulter le site : www.patents.ascensia.com

IVD Pour un usage de diagnostic in vitro

ASCENSIA
Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

0088

Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts et le logo No Coding (Sans codage) sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Bolus Wizard, CareLink, Guardian, MiniMed et Paradigm sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Medtronic MiniMed, Inc.

Medtronic

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés.