

Har du bruk for hjelp?

Du kan få yderligere opplysninger ved at besøge www.diabetes.ascensia.com eller ved at ringe til kundeserv +45 42 82 80 00 (tilgjengelig 8-16 på alle hverdager).

Dit apparat er forinndstillet og låst, så det viser resultater i mmol/L. Hvis dine resultater er i mg/dL skal du kontakte kundeservice.

Distributør i Danmark:
Ascensia Diabetes Care Denmark ApS
Amager Strandvej 390, 1. sal
DK-2770 Kastrup
Kundeservice: +45 42 82 80 00
diabetesdk@ascensia.com

Til in vitro diagnostisk bruk.

Læs mere om patenter og relaterede licenser på www.patents.ascensia.com.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoet, Contour, Microlet, No Coding (Ingen koding) logoet, Second-Chance, Second-Chance Sampling-logoet, Smartcolour og Smartlight er varemerker og/eller registrerede varemerker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple og Apple-logoet er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Bluetooth® merket og logoen er registrerte varemerker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse merker fra Ascensia Diabetes Care sker under licens.

Google Play og Google Play-logoet er varemerker tilhørende Google LLC. (® = registreret varemerke. ™ = ikke-registreret varemerke. SM = servicemærke.)

Alle andre varemerker tilhører deres respektive ejere og anvendes udelukkende til generell information. Intet forhold eller godkendelse skal være påregnet eller underforstået.



ASCENSIA
Diabetes Care

© 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Alle rettigheter forbeholdes.



90007635
Rev. 10/20

Trenger du hjelp?

Du finner mer informasjon på www.diabetes.ascensia.com, eller ring kundeservice: +47 67 12 28 00 (tilgjengelig fra 08:00 til 16:00 på hverdager).

Måleren er forhåndsinnstilt og låst til å vise resultater i mmol/L. Hvis resultatet er i mg/dL, kan du ta kontakt med kundeservice.

Distribuert i Norge av:
Ascensia Diabetes Care Norway AS
Strandveien 50
1366 Lysaker
Norge
Kundeservice: +47 67 12 28 00
Fax: +47 67 12 28 01
diabetes.1@ascensia.com

For in vitro diagnostisk bruk.

For informasjon om patenter og tilknyttede lisens, se www.patents.ascensia.com.


Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen, Contour, Microlet, No Coding-logoen (Ingen koding), Second-Chance (Mulighet for etterfylling), Second-Chance (Mulighet for etterfylling av blod)-prøvetakinglogoen, Smartcolour og Smartlight er varemerker og/eller registrerte varemerker for Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemærke for Apple Inc.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike logoer av Ascensia Diabetes Care er under lisens.

Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC. (® = registrert varemerke. ™ = uregistrert varemerke. SM = servicemærke.)

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere og brukes kun til informasjonsformål. Ingen forhold eller bifall skal konkluderes med eller underforstås.

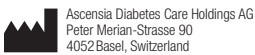

ASCENSIA
Diabetes Care

© 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Alle rettigheter forbeholdt.



90007635
Rev. 10/20

Contour®
next
System til måling af blodsukker

Anvendes sammen med
CONTOUR®DIABETES app, der kan
downloades fra App Store™ eller
Google Play™.



Anvender kun CONTOUR®NEXT
blodsukkerteststrimler.

KORT VEJLEDNING

Contour®
next
Målesystem for blodsukker

Fungerer med CONTOUR®DIABETES app
som kan lastes ned fra App Store™ eller
Google Play™.



Bruker kun CONTOUR®NEXT
teststrimler.

LOMMEGUIDE

Dit CONTOUR®NEXT apparat



BEMÆRK: Dit apparat leveres med en forindstilling for klokkeslæt, dato og målområde. Du kan ændre disse funktioner i **Indstillinger**.

FORSIGTIG

Dit CONTOUR NEXT apparat fungerer kun sammen med CONTOUR®NEXT teststrimler og CONTOUR®NEXT kontrolopløsning.

Læs CONTOUR NEXT brugervejledningen for *Tilsigtet brug* af apparatet og en liste over *Vigtige sikkerhedsoplysninger*, advarsler og forholdsregler.

Din CONTOUR®NEXT-måler



MERK: Måleren leveres med et forhåndsinnstilt tidspunkt, dato og målområde. Du kan endre disse funksjonene i **Innstillinger**.

FORSIKTIG

CONTOUR NEXT måleren fungerer kun med CONTOUR®NEXT teststrimler og CONTOUR®NEXT kontrolløsning.

Les brukerveiledningen til CONTOUR NEXT for å finne *tiltenkt bruk* for måleren og en liste over *viktig sikkerhetsinformasjon*, advarsler og forholdsregler.

Tænd og sluk for apparatet

- Hold **OK**-knappen nede i ca. 3 sekunder, indtil apparatet er tændt eller slukket.
- Hvis du sætter en teststrimmel i apparatet, tændes det også.
- Tryk på **OK** to gange, når apparatet er tændt for at tænde det hvide lys i teststrimmelporten.

Start-skærmen

Start-skærmen har 2 valgmuligheder: **Dagbog** og **Indstillinger**.

- Tryk på knappen **▼**, indtil den ønskede valgmulighed blinker.
- Tryk på **OK**-knappen, mens **Dagbog** **blinker**, hvis du vil se tidligere målinger og Gennemsnit. Se *Dagbog* og *Vis gennemsnit*.
- Vil du ændre dine Indstillinger, skal du trykke på **OK**-knappen, når **Indstillinger** **blinker**. Se *Indstillinger*.

For at få vist et skema med symboler, se Apparats skærm på den anden side.

BEMÆRK: Når et symbol blinker, kan du vælge det.

Måling og sluk for apparatet

Se indlægssedlen til fingerprikkeren for detaljeret vejledning i klargøring af fingerprikkeren.

ADVARSEL: Potentiel biologisk risiko

- Vask altid hænderne med sæbe og vand og tør dem godt, før og efter du foretager målinger eller håndterer apparatet, fingerprikkeren eller teststrimlerne.
- Alle dele i dette startset betragtes som potentielt smittefarlige og kan potentielt overføre smitsomme sygdomme.

Du finder flere oplysninger i CONTOUR NEXT-brugervejledningen.

FORSIGTIG

Den leverede fingerprikker er beregnet til egenmåling udført af én enkelt patient. På grund af risiko for infektion må den ikke bruges til flere end én person.

Måling i fingertupp

Se pakningsvedlegget til stikkepenen for detaljerte instruksjoner om klargjøring av stikkepenen.

ADVARSEL: Potensiell biologisk smittefare

- Vask alltid hendene med såpe og antibakteriell såpe, og tørk dem godt både før og etter måling og ved håndtering av måleren, stikkepenen eller teststrimlene.
- Alle deler i enheten betraktes som biologisk farlige og kan potensielt overføre smittsomme sykdommer.

For mer informasjon, se brukerveiledningen til CONTOUR NEXT.

FORSIKTIG

Stikkepenen som fulgte med enheten er beregnet for egenmåling av én enkeltperson. Den må ikke benyttes på mer enn én person på grunn av smittefare.

Se *Displayet på måleren på den andre siden for symboloversikt*.

MERK: Når et symbol blinker, kan du velge det.

- Klargør fingerpsiden. Der henvises til indlægssedlen til fingerprikkeren for detaljeret vejledning.
- Før den grå, firkantede ende af en ny teststrimmel ind i teststrimmelporten med et fast greb, indtil apparatet bipper.



Apparatet tænder og viser skærmen **Tilfør blod**. Apparatet er nu klar til at måle.

- Brug fingerprikkeren til at få en bloddråbe frem fra fingerspidsen.
- Stryk hånden og fingeren i retning mod indstiksstedet, så der dannes en bloddråbe.
- Lad straks spidsen af teststrimlen berøre bloddråben.

FORSIGTIG

Indlægssedlen til fingerprikkeren indeholder instruktioner til fjernelse af lancetten fra fingerprikkeren.

Second-Chance® Sampling (Second-Chance fyldning)

Bipper apparatet to gange, og skærmen viser en blinkende bloddråbe med et plustegn, er der ikke nok blod på teststrimlen.


Undlad at fjerne teststrimlen. Du har 60 sekunder til at tilføre mere blod til den **samme** teststrimmel.

Måltidsmarkeringer

Når Måltidsmarkeringer er slået Til, kan du markere målinger som **Fastende** . **Før Måltid** eller **Efter Måltid** . Se *Sådan slår du måltidsmarkeringer Til*.

smartLIGHT®-indikator for målområde

Apparatet viser dit resultat med enheder, tid, dato og målområde:

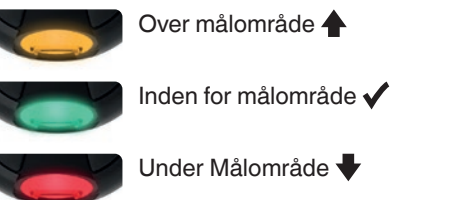

Lyset fra teststrimmelporten viser en farve, der angiver, om din måling er over, i eller under dit personlige målområde.

Second-Chance® sampling (Mulighet for etterfylling av blod)

Hvis måleren piper to ganger og skjermbildet viser en blinkende bloddråpe med et plustegn, har ikke teststrimmelen nok blod.


Ikke fjern strimmelen. Du har 60 sekunder på deg til å påføre mer blod på **samme** teststrimmel.

Måltidsmarkeringer

Når Måltidsmarkeringer er slått på, kan du markere målinger som **Fastende** . **Før måltid** eller **Efter måltid** . Se *Slå på måltidsmarkeringer*.

smartLIGHT-målområdeindikator

Måleren viser resultatet ditt med enheter, tid, dato og målområdeindikator:

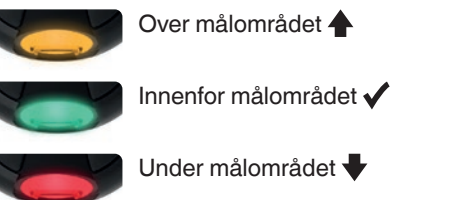

Teststrimmelporten viser en farge som angir om målingen er over, innenfor eller under ditt personlige målområde.

Dagbog

- Apparatet tænder, når du holder **OK**-knappen nede i 3 sekunder.

Dagbogen **blinker**.

- Hvis du vil se dine registreringer i **Dagbogen**, skal du trykke på **OK**-knappen for at åbne Dagbogen.
- Hvis du vil blade gennem **Dagbogen**, skal du trykke på knappen **▲** eller **▼**. Hvis du vil blade hurtigt gennem registreringerne skal du holde knappen **▲** eller **▼** nede.
- Hvis du vil lukke **Dagbogen** og vende tilbage til **Start**-skærmen, kan du til enhver tid trykke på **OK**-knappen.

Vis gennemsnit

- For at åbne **Dagbog** fra Start-skærmen skal du trykke på knappen **OK**, mens **Dagbog** blinker.
- Hvis du vil se dine Gennemsnit, trykker du på knappen **▲** i det *første* **Dagbog**-skærmbillede.

- Tryk på knappen **▲** for at blade gennem dine 7-, 14-, 30- og 90-dages-gennemsnit.

- Hvis du vil vende tilbage til dine målinger, trykker du på knappen **▼** på **7 d Avg** (7-dages-gennemsnit).
- Hvis du vil afslutte Gennemsnit og vende tilbage til **Start**-skærmen, skal du trykke på **OK**-knappen.

Indstillinger

Du kan ændre indstillingerne for:

- Dato:** Ændring af format og dato.
- Klokkeslæt:** Ændring af format og klokkeslæt.
- Måltidsmarkeringer** : Slå Måltidsmarkeringer Til eller Fra.
- Bluetooth® trådløs teknologi** : Slå Bluetooth trådløs funktion Til eller Fra.
- smartLIGHT-funktion** : Slå smartLIGHT-funktion Til eller Fra. Se *smartLIGHT-indikator for målområde*.

- Målområder** : Vise eller ændre Målområder.
- Lyd** : Slå Lyd Til eller Fra.
- Påmindelse** : Slå påmindelsesfunktionen Til eller Fra.

BEMÆRK: Se brugervejledningen, hvis du vil ændre dato og klokkeslæt på apparatet.

Sådan ændres apparatets indstillinger:

- Du fremhæver symbolet **Indstillinger** på skærmen **Start** ved at trykke på knappen **▼**.
- Når symbolet for **Indstillinger** blinker, trykker du på **OK**-knappen for at starte **Indstillinger**.

Indstillinger fortsættes på den anden side

- Målområder** : Vis og endre målområder.
- Lyd** : Slå lyd av eller på.
- Påminnelse** : Slå Påminnelse-funksjonen av eller på.

MERK: Se brukerveiledning for informasjon om å endre målerens klokkeslett og dato.

Endre målerinnstillinger:

- Marker symbolet **Innstillinger** fra **Hjem**-skjermbildet ved å trykke på **▼**-knappen.
- Når **Innstillinger**-symbolet blinker, trykker du på **OK**-knappen for å legge inn **Innstillinger**.

Innstillinger fortsetter på neste side

