

**Contour**  
Evolving with you

# Nøjagtig og enkel blodsukkermåling med CONTOUR®NEXT



**Contour**  
**next**  
System til måling af blodsukker

  
**ASCENSIA**  
Diabetes Care

# BLODSUKKERMÅLING PÅ 1, 2, 3



Blodsukkerapparatet er klar til brug direkte fra æsken. Vask dine hænder og tør dem grundigt, inden du måler dit blodsukker.

1



Indsæt teststrimlen med den grå firkantede ende i teststrimmelporten. Det vil automatisk tænde apparatet.

2



Frembring en bloddråbe med fingerprikkeren, og lad bloddråben blive suget ind i spidsen på teststrimlen. Apparatet tæller ned.

Med **Second-Chance®** fyldning har du mulighed for at påføre mere blod inden for 60 sekunder, hvis første bloddråbe ikke var stor nok.

3



Dit resultat bliver vist efter 5 sekunder, og **smartLIGHT®** funktionen angiver om dit resultat er over, under eller indenfor målområde. Resultatet bliver automatisk gemt i apparatet.



Scan QR-kode for  
instruktionsvideoer




**Contour**  
**next**

System til måling af blodsukker

# SmartLIGHT®funktion



Den tydelige **smartLIGHT®funktion** viser dig, hvordan resultatet ligger i forhold til dit målområde. Alle målområderne er forudindstillet. Ved behov kan du ændre indstillingen til dine personlige mål efter aftale med din behandler.

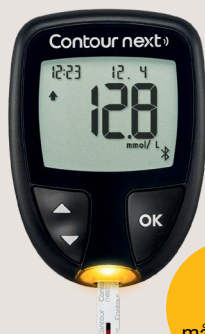

**Gul**  
Over  
målområde



**Grøn**  
Indenfor  
målområde



**Rød**  
Under  
målområde

Det overordnede mål er  
forudindstillet til 3,9-10,0 mmol/L

## CONTOUR®DIABETES app



- Trådløs overførsel fra dit CONTOUR®NEXT apparat til **CONTOUR®DIABETES app**
- Giver enkelt overblik og hjælper dig med at se sammenhænge i dine blodsukkerresultater
- Gør det nemt at dele, sende og udskrive dine blodsukkerrapporter




Download gratis **CONTOUR®DIABETES app**



# CONTOUR®NEXT

## målesystem tilbyder:

- smartLIGHT® funktion
- Enkel blodsuktermåling
- Nøjagtige resultater
- Lille blodmængde på 0,6 µl
- Måletid på 5 sekunder
- Second-Chance® fyldning i op til 60 sek.
- Trådløs overførsel til gratis CONTOUR®DIABETES app
- Hukommelse på 800 målinger
- Blodsukker gennemsnit 7, 14, 30 og 90 dage
- Måltidsmarkeringer før- og efter måltid
- Påmindelser efter måltider
- Lys i strimmelport

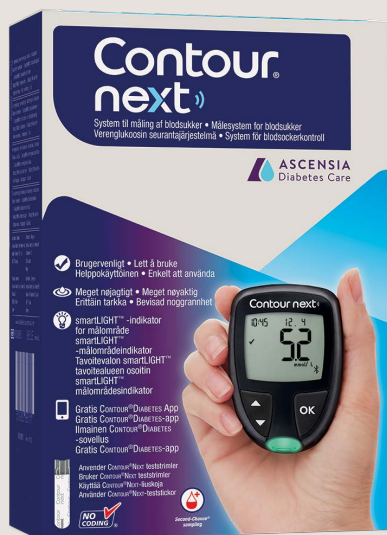

**Ascensia Diabetes Care Denmark ApS**

Tlf. 4282 8000

[diabetesdk@ascensia.com](mailto:diabetesdk@ascensia.com)

Klik ind på [www.diabetes.ascensia.dk](http://www.diabetes.ascensia.dk)  
eller [www.facebook.com/livetmeddiabetes](https://www.facebook.com/livetmeddiabetes)  
for yderligere information

**Contour  
next**

System til måling af blodsukker

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logoet, Contour, Second-Chance, smartLIGHT og Ingen Kodning er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  
2025 © Ascensia Diabetes Care