

Contour
Evolving with you

Enkel blodsukkermåling med CONTOUR®PLUS BLUE



Contour
plus BLUE
System til måling
af blodsukker

ASCENSIA
Diabetes Care

BLODSUKKERMÅLING PÅ 1, 2, 3

Blodsukkerapparatet er klar til brug direkte fra æsken.
Vask dine hænder og tør dem grundigt, inden du måler dit blodsukker.



Indsæt teststrimlen med den grå firkantede ende i teststrimmelporten. Det vil automatisk tænde apparatet.



Frembring en bloddråbe med fingerprikkeren, og lad bloddråben blive suget ind i spidsen på teststrimlen. Apparatet tæller ned.



Dit resultat bliver vist, og smartCOLOUR®-indikator angiver om dit resultat er over, under eller indenfor målområdet. Resultatet bliver automatisk gemt i apparatet.

Scan QR-kode for
instruktionsvideoer



SMARTCOLOUR®INDIKATOR

Den tydelige smartCOLOUR®indikator viser dig, hvordan resultatet ligger i forhold til dit målområde. Målområderne er forudindstillet, men kan ændres til de personlige mål, der er aftalt med din behandler.



CONTOUR®DIABETES APP

- Undgå håndskrevet dagbog og overfør trådløs fra dit CONTOUR®PLUS BLUE apparat til CONTOUR®DIABETES app.
- Giver enkelt overblik og hjælper dig med at se sammenhænge i dine blodsukkerresultater
- Gør det nemt at dele, sende og udskrive dine blodsukkerrapporter



Download gratis

CONTOUR®DIABETES app



CONTOUR®PLUS BLUE målesystem tilbyder:

- smartCOLOUR® indikator
- Enkel blodsukkermåling
- Nøjagtige resultater
- Lille blodmængde på 0,6 µl
- Måletid på 5 sekunder
- Second-Chance® fyldning i op til 30 sek.
- Trådløs overførsel til gratis CONTOUR®DIABETES app
- Hukommelse på 800 målinger
- Blodsukker gennemsnit 7, 14, 30 og 90 dage
- Måltidsmarkeringer før- og efter måltid
- Påmindelser efter måltider



ASCENSIA
Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care Denmark ApS

Tlf. 42 82 80 00

diabetesdk@ascensia.com

Klik ind på www.diabetes.ascensia.dk
eller www.facebook.com/livetmeddiabetes
for yderligere information

**Contour®
plus BLUE**
System til måling
af blodsukker

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logoet, Contour, Second-Chance, smartCOLOUR og Ingen Kodning er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
2024 © Ascensia Diabetes Care

ASCENSIA
Diabetes Care