

Contour
Evolving with you

Enkel blodsukkermåling med CONTOUR®PLUS



**Contour
plus**
System til måling af blodsukker


ASCENSIA
Diabetes Care

BLODSUKKERMÅLING PÅ 1, 2, 3

Når du åbner æsken, er blodsukkerapparatet klar til brug.



Vask dine hænder og tør dem grundigt.



Indsæt teststrimlen med den grå firkantede ende i teststrimmelporten. Det vil automatisk tænde apparatet.



Lad bloddråben blive suget ind i spidsen på teststrimlen. Apparatet tæller ned og dit resultat bliver vist. Resultatet bliver automatisk gemt i apparatet.

MICROLET®NEXT fingerprikker



Endehætten fjernes ved at dreje den sort/hvide del af. Sæt lancetten helt ind i fingerprikkeren. Drej beskyttelseshætten af lancetten og gem den.



Sæt den sort/hvide endehætte på plads. Gør fingerprikkeren klar ved at trække den hvide ende helt tilbage, indtil du hører et klik.



Stikkedybden kan indstilles fra 1-5, hvor 5 er dybest. Sæt derefter endehætten det sted på fingeren, du ønsker at stikke og tryk på den hvide udløserknap.




Drej endehætten af efter måling, og sæt lancetten ned i beskyttelseshætten. Skub lancetten ud med den grå udløser.

CONTOUR®PLUS

målesystem tilbyder:

- Enkel blodsuktermåling
- Nøjagtige resultater
- Lille blodmængde på 0,6 µl
- Måletid på 5 sekunder
- Second-Chance® fyldning i op til 30 sek.
- Hukommelse på 480 målinger
- Blodsukker gennemsnit 7,14, og 30 dage
- Måltidsmarkeringer før- og efter måltid
- Påmindelser efter måltider

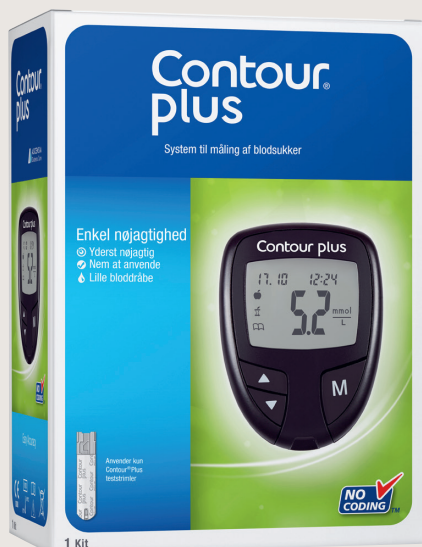

Ascensia Diabetes Care Denmark ApS

Tlf. 4282 8000

diabetesdk@ascensia.com

Klik ind på www.diabetes.ascensia.dk
eller www.facebook.com/livetmeddiabetes
for yderligere information

**Contour
plus**
System til måling af blodsukker

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logoet, Contour, Second-Chance og Ingen Kodning er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
2021 © Ascensia Diabetes Care

